

Tisztítás

A Prémium, **fedőanyaggal ellátott betétek** nem moshatóak, mert a ragasztás elválhat, **csak a felületük tisztítható.**

- A bőr fedőanyagú betétek bőrtisztító spray-vel, a nem bőr felületek (memóriahabos, sportfedések és technikai anyagok) vízzel benedvesített szivaccsal tisztíthatóak.
- A **Standard, fedőanyag nélküli betétek** könnyen tisztán tarthatóak, általános mosószerrel, kézzel és akár mosógépben is, **30 °C-on moshatóak.**
- A talpbetétek szerves oldószerrel, erős fertőtlenítőszerrel nem tisztíthatóak.
- A betétet ajánlott használaton kívül, éjszakára a cipőből kihúzva szellőztetni.
- A talpbetét 60 °C-nál magasabb hőmérséklet hatására megromolódhat, mechanikai hatásoktól óvni kell!
- Amennyiben elázik a betét, a cipőből kivéve alaposan ki kell szárítani.
- A betétet ne szárítsuk nyílt lángnál és semmilyen magas hőmérsékletű forrással (pl. fűtőtesten vagy hajszárítóval)!

Garancia

Minőségi kifogás esetén a vásárló 1 éven belül garanciális igényrel élhet, mely a vásárlás pillanatában meglévő rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik, ha a talpbetét a rendeltetésszerű használat, megfelelő ápolás, tárolás stb. ellenére meghibásodik. A termék rendeltetésszerű használata melletti természetes elhasználódás (talpbetét nagymértékű kopása, fedőanyag mechanikai sérülése, ledörzsölődése, lábizzadság okozta foltosodás, egyedi járás, illetve lábsajátosság okozta károsodás stb.) alapvetően nem lehet ok a reklamációra. Az 1 éves garancia nem tartóssági vagy hordási idő, hanem egy jog arra, hogy egy adott időtartamon belül a termék meghibásodása reklamálható legyen, melyet észrevételt követően, a vásárló azonnal köteles jelezni. A Batz Egyedi talpbetét 1 év hordási időtartamra készül.

A reklamációs igényt kérjük, hogy a vásárláskor kapott bizonylattal együtt abba az üzletbe juttasd vissza, ahol a vásárlás történt. A reklamációról az üzletben jegyzőkönyv készül, ahonnan a talpbetétet beküldik bevizsgálásra. Kérjük, hogy higiéniai okok miatt a reklamáció előtt a talpbetét legyen megtisztítva, hiszen a nem megfelelő kezelés is képezheti elutasítás tárgyát.



KÖVESS MINKET
FACEBOOK ÉS INSTAGRAM
FELÜLETEINKEN!

#BATZ.HU

Gyártja és forgalmazza:

Batz Hungary Kft.

2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

talpbetet.infoline@batz.hu

batz.hu

Érvényes: 2022.06.01-től visszavonásig



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



GRATULÁLUNK, HOGY EGYEDI TALPBETÉT TULAJDONOS LETTÉL!

A lábunkhoz tervezett talpbetét egy igen fontos lépés az egészség felé, hiszen egy jól megválasztott cipő és a Batz egyedi talpbetét jelentősen megkönnyítheti a mindennapokat. Akár néhány nap használat után csökkentheti a lábfej fáradtságérzetét és fájdalmait, javítja a komfortérzetet, miközben a megváltozott statikájú lábfej boltozatait ideális ívben tartja. A Batz egyedi talpbetétek az innovatív eljárásnak köszönhetően szigorúan ellenőrzött körülmények között, manufaktúráinkban, prémium alapanyagokból, nagy odafigyeléssel készülnek. Vásárlóink elégedettségét az elmúlt években legyártott több, mint 50.000 egyedi talpbetét igazolja.

Használati javaslat

A Batz egyedi talpbetét mindennapi viseletre utcai vagy sport cipőbe, rendszeres használatra, vagy sportolási célra javasolt.

A talpbetét viselése nem ajánlott vizes vagy sáros, esetleg vegyszerrel szennyezett környezetben. Teljes egyedi talpbetét max. 2-3 cm-es sarokmagasságú cipőbe, 3/4-es egyedi talpbetét max. 4-5 cm-es sarokmagasságú cipőbe helyezhető.

A betétet évente érdemes cserélni, nemcsak higiéniai okokból. A láb boltozatai a talpbetét használata során változhatnak (javulhatnak), ezért célszerű a láb állapotát évente legalább egyszer új talpfelméréssel felülvizsgálni.

A talpbetét anyaga

Rezgéscsillapító, zárt cellás szerkezetű habosított anyag, EVA, ami környezetkímélő és az egészségre ártalmatlan. Jó hőszigetelő, véd a hideg és meleg ellen egyaránt, rugalmas, rendkívül strapabíró, hosszú időn át megőrzi tartását és formáját.

Tanácsok

Az első napokban csak 1-2 órán át javasolt a talpbetét viselése, majd 2-4 hét alatt fokozatosan érdemes növelni a használat idejét a megszokásig. Akiknél már korábban jelentkeztek a boltozatok lesüllyedésének kellemetlen tünetei, az első napokban, hetekben zavaró, akár fájdalmas is lehet a betét viselése. Idősebb korban a hozzászoktatás hosszabb időt, akár 4-6 hetet is igénybe vehet.

Az egyedi talpbetét alkalmazása

Vedd ki cipődből az eredeti betétet! Amennyiben nincs kivehető betét, győződj meg arról, hogy nincs beépített boltozat emelés a cipőben.

Egyedi talpbetét nem helyezhető a beépített boltozat emelővel ellátott, vagy szupinált/pronált cipőbe.

Érdemes megvizsgálni, hogy a cipő bősége lehetővé teszi-e, hogy az egyedi betéttel együtt a lábfejednek elegendő hely maradjon. Egyedi talpbetét viseléséhez ajánlott lehet fél-egy számmal nagyobb cipőt választani. Új cipő vásárlásakor betéttel együtt érdemes próbálni. Az egyedi talpbetétet a cipő sarokrészéhez igazítva kell beilleszteni. A betétnek 1-2 mm előre-hátra mozgásteret javasolt biztosítani. Arról, hogy megfelelően került-e be a jobb- ill. baloldali betét, úgy tudsz meggyőződni, hogy a fedőanyagon található hosszboltozat emelő feletti perforálásnak* a cipő belső oldalára kell esnie.



Abban az esetben, ha a talpbetét nem illeszkedik bele a cipőbe, érdemes méretre igazítani. Kizárólag a talpbetét lábujjak felőli része vágható, igazítható. A sarokrész nem alakítható és nem rövidíthető.



A 3/4-es egyedi talpbetétek használata

1. A cipő felső részét szét kell nyitni, a fűzőrészt teljes terjedelmében meg kell lazítani, illetve a tépőzárakat és a csatokat is ki kell engedni.
2. A háromnegyedes betét sarok alatti részét szorosan a cipő sarokrészéhez kell illeszteni.
3. A cipő felhúzása folyamán a cipőt majdnem függőleges irányba kell állítani, hogy a betét ne csússzon előre, mikor a lábfejet beledugjuk a cipőbe.
4. Majd a talajra helyezzük a cipővel együtt a lábat, és felállva meggyőződünk arról, hogy nem mozdult-e el, nem csúszott-e előre a betét a cipőben.
5. Akkor helyeztük el helyesen a cipőben a talpbetétet, ha a betét a talpat a problémás helyeken megtámasztja, használat során nem zavaró és nem kényelmetlen. Abban az esetben nincs jó helyen a betét a cipőben, ha nyom, és viselése kényelmetlen érzéssel jár.
6. Ha a betét jól illeszkedik a cipőbe, a következő lépés, a cipőfűző meghúzása, illetve a tépőzár és a csatok megfelelő rögzítése.



7. A talpbetét dobozában található a 3/4-es talpbetetre illeszthető kétoldalú ragasztó pötty. Ennek használatát abban az esetben javasoljuk, ha hordás közben a betét elcsúszik, és annak rögzítése szükséges. A ragasztópötty egyik oldaláról húzzuk le a védőpapírt, és illesszük, ragasztjuk a betét aljára, a sarokrész közepére. Végül a betétre illesztett pötty másik oldaláról is húzzuk le a védőpapírt és illesszük, rögzítjük a betétet a cipőbe a fentiek szerint.