



Egyedi talpbetét



Használati útmutató

Köszönjük, hogy a Batz egyedi talpbetétet választotta. Kérjük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig! A Batz egyedi talpbetét a megváltozott statikájú lábfej boltozatait (haránt és hossz) egyénre szabottan az ideális ívben tartja, ezáltal csökkentheti a lábfej fáradtságérzetét és fájdalmait, enyhítheti a panaszait, javíthatja a komfortérzetet.

Használati javaslat

A Batz egyedi talpbetét rendszeres használatra alkalmas. Utcai vagy sportcipőben természetes körülmények között viselhető. Nem alkalmazható olyan feltételek mellett, olyan munkahelyen, ahol a betétet és a cipőt vízben vagy sáros közegben, vagy vegyszerrel szennyezett környezetben, vagy -10°C - $+30^{\circ}\text{C}$ -tól eltérő hőmérsékleten használják.

Teljes egyedi talpbetét max. 2-3 cm-es sarokmagasságú cipőbe, 3/4-es egyedi talpbetét max. 4-5 cm-es sarokmagasságú cipőbe helyezhető.

A betétet fél-, egyévente érdemes cserélni - nemcsak higiéniai okokból - hanem mert a láb boltozatai a talpbetét használata során változhatnak (javulhatnak), ezért érdemes a láb állapotát évente legalább egyszer új talpfelméréssel felülvizsgálni.

A talpbetét alapanyaga

Rezgéscsillapító, zárt cellás szerkezetű habosított anyag, EVA (etilén-vinil-acetát). Az egészségre ártalmatlan, környezetkímélő anyag. Jó hőszigetelő, véd a hideg és meleg ellen egyaránt. Rugalmas, rendkívül ütésálló, hosszú időn át megőrzi tartását és formáját.

Fontos figyelmeztetés - tanácsok

Az első napokban csak 1-2 órán át használja, majd 2-4 hét alatt fokozatosan növelje a használat idejét a megszokásig. Akiknél már korábban jelentkeztek a boltozatok lesüllyedésének kellemetlen tünetei, az első napokban, hetekben kifejezetten kellemetlen, akár fájdalmas is lehet a betét viselése. Idősebb korban a hozzászoktatás hosszabb időt (akár 4-6 hetet) is igénybe vehet.

Tisztítás

- 1.** A Prémium, fedőanyaggal ellátott betétek nem moshatóak sem kézzel, sem mosógépben! Csak a felületük tisztítható!
- 2.** A prémium- és velúr bőr fedőanyagú betétek bőrtisztító spray-vel, a nem bőr felületek (memóriahabos, sport és technikai anyagok) vízzel nedvesített szivaccsal tisztíthatóak.
- 3.** A Standard, fedőanyag nélküli betétek könnyen tisztán tarthatóak. A fedés nélküli betétek kézzel és akár mosógépben, általános mosószerrel 30 °C-on moshatóak!
- 4.** A talpbetétek szerves oldószerrel, erős fertőtlenítőszerrel nem tisztíthatóak!
- 5.** A betétet ajánlott használaton kívül (éjszakára) a cipőből kihúzva szellőztetni.
- 6.** A talpbetét 60 °C-nál magasabb hőmérséklet hatására megrongálódhat, mechanikai hatásoktól óvni kell!
- 7.** Amennyiben elázik a betét, a cipőből kivéve alaposan szárítsa meg!
- 8.** A betétet ne szárítsa nyílt lángnál és semmilyen magas hőmérsékletű forrással pl. fűtőtesten vagy hajszárítóval!

Reklamáció

A Batz egyedi talpbetét 6 hónapos garanciával, 1 év kihordási időre készült. A rendeltetésszerű használat mellett felmerülő minőségi kifogásokat kérjük, a Megrendelés helyszínén jelezni és reklamációs jegyzőkönyvben rögzíteni.



Prémium (fedéssel) és Standard (fedés nélküli) Batz egyedi talpbetétek

Az egyedi talpbetét alkalmazása

Vegye ki az eredeti betétet a cipőjéből! Amennyiben nincs kivehető betét, győződjön meg arról, hogy nincs beépített



boltozat emelés a cipőben. **Beépített boltozat emelővel ellátott cipőbe egyedi talpbetét nem helyezhető!**

Ezen kívül győződjön meg arról is, hogy a cipő bősége lehetővé teszi-e, hogy az egyedi betéttel együtt a lábfejének is elegendő hely maradjon. Sokszor érdemes az egyedi talpbetét viseléséhez fél-egy számmal nagyobb cipőt választani. Új cipő vásárlásakor a betéttel együtt próbáljon!

Az egyedi talpbetétet a cipő sarokrészéhez igazítva illessze be. A betétnek 1-2 mm előre-hátra mozgásteret biztosítani kell. Arról, hogy megfelelően tette be a jobb- ill. baloldali betétet, úgy tud meggyőződni, hogy a fedőanyagon található hosszboltozat emelő feletti perforálásnak (lásd: **a**) a cipő belső oldalára kell esnie. Abban az esetben, ha a talpbetét feszülne, vagy nem illeszkedne bele a cipőbe, igazítsa méretre. Kizárólag a talpbetét lábujjak felőli része vágható, igazítható. A sarokrészt kérjük, ne alakítsa, ne rövidítse!

1-2 mm



A 3/4-es egyedi talpbetétek használata



- 1.** A cipőn a fűzőrészt teljes terjedelmében meg kell lazítani, illetve a tépőzárakat és a csatokat is ki kell engedni. Amennyire csak lehet, a cipő felső részét szét kell nyitni.
- 2.** A háromnegyedes betét sarok alatti részét szorosan a cipő sarokrészéhez kell illeszteni.
- 3.** A cipő felhúzása folyamán a cipőt majdnem függőleges irányba kell állítani, hogy a betét ne csússzon előre, mikor a lábfejet beledugjuk a cipőbe.
- 4.** Majd a taljra helyezzük a cipővel együtt a lábat, és felállva meggyőződünk arról, hogy nem mozdult el, nem csúszott előre a betét a cipőben.
- 5.** Akkor helyeztük el helyesen a cipőben a talpbetétet, ha a betét a talpat a problémás helyeken megtámasztja, használat során nem zavaró és nem kényelmetlen. Abban az esetben nincs jó helyen a betét a cipőben, ha nyom, és kényelmetlen érzés párosul hozzá.
- 6.** Ha a betét jól illeszkedik a cipőbe, a következő lépés, hogy a cipőfűzőt meghúzzuk, illetve a tépőzárakat és a csatokat megfelelően rögzítjük.
- 7.** A talpbetét dobozában található a 3/4-es talpbetéthez ajánlott kétoldalú ragasztó pötty. Ennek használatát abban az esetben javasoljuk, ha hordás közben a betét elcsúszik, és annak rögzítése szükséges a cipőben. A ragasztópötty egyik oldaláról húzzuk le a védőpapírt, és illesszük, ragasztjuk a betét aljára, a sarokrész közepére. Végül a betétre illesztett pötty másik oldaláról is húzzuk le a védőpapírt és illesszük, rögzítjük a betétet a cipőbe a fentiekben leírtak alapján.





EGYEDI
Talpbetét

ÁPOLÁSTECHNIKAI ESZKÖZ

**A kockázatokkal kapcsolatban
olvassa el az útmutatót vagy
kérdesse meg kezelőorvosát!**

Érvényes: 2017.01.01-től visszavonásig.

Gyártja és forgalmazza:

Batz Hungary Kft.

2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

Bővebb információ:

**egyeditalpbetet.batz.hu
talpbetet.infoline@batz.hu**



Tudomány a kényelem mögött